

Urządzenie 4w1 AT-332 mikrodermabrazja + peeling kawitacyjny + ultradźwięki + głowica ciepło – zimno

AT-332 to profesjonalne i wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne, które pozwala na wykonywanie czterech różnych rodzajów zabiegów: mikrodermabrazji diamentowej, peelingu kawitacyjnego, zabiegów z użyciem ultradźwięków i zabiegów łagodzących przy użyciu głowicy ciepło-zimno.

W skład urządzenia wchodzi:

- baza urządzenia
- 2 dysze do mikrodermabrazji
- 9 frezów diamentowych o różnej gradacji i wielkości
- głowica ciepło-zimno
- szpatuła do peelingu kawitacyjnego i sonoforezy
- elektroda bierna
- 2 głowice ultradźwiękowe do ciała i do twarzy

Parametry techniczne:

- napięcie 230 V
- częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz
- moc 75 W

Wymiary: wys. 12 cm x szer. 33 cm x dł. 26 cm

Instrukcja obsługi:

- Zmontuj wszystkie części urządzenia
- Włącz przycisk ON/OFF aby włączyć ekran LCD
- **Naciśnij przycisk „funkcja” aby wybrać jedną z czterech funkcji urządzenia : 1 – peeling kawitacyjny, 2 – ultradźwięki, 3 – mikrodermabrazja diamentowa, 4 – głowica ciepło zimno.**
- Po włączeniu do żądanej funkcji, ustawić poziom i czas pracy, a następnie nacisnąć przycisk "Start / Pauza", aby funkcję rozpocząć.

FUNKCJE



Peeling kawitacyjny:

Peeling kawitacyjny wykorzystuje zjawisko kawitacji do oczyszczania skóry z martwych komórek i innych zanieczyszczeń. W funkcji peelingu kawitacyjnego do wyboru mamy 3 rodzaje fali ultradźwiękowej.

- Należy włączyć urządzenie do sieci oraz włączyć ekran LCD
- Wybieramy pożądany rodzaj fali ultradźwiękowej, poziom intensywności (w trakcie zabiegu dopasowujemy go do odczuć klienta), oraz czas. Urządzenie po włączeniu pokaże nam domyślne ustawienia które można edytować jak powyżej.
- Po wyborze parametrów wciskamy przycisk start / pauza.

- Na nadgarstek klienta zakładamy opaskę z elektrodą bierną, zamykającą obwód, należy zwilżyć ją wodą. Podczas peelingu kawitacyjnego ustawiamy szpatułę pod kątem 45°, przesuwamy ją do przodu.

TRYBY PRACY

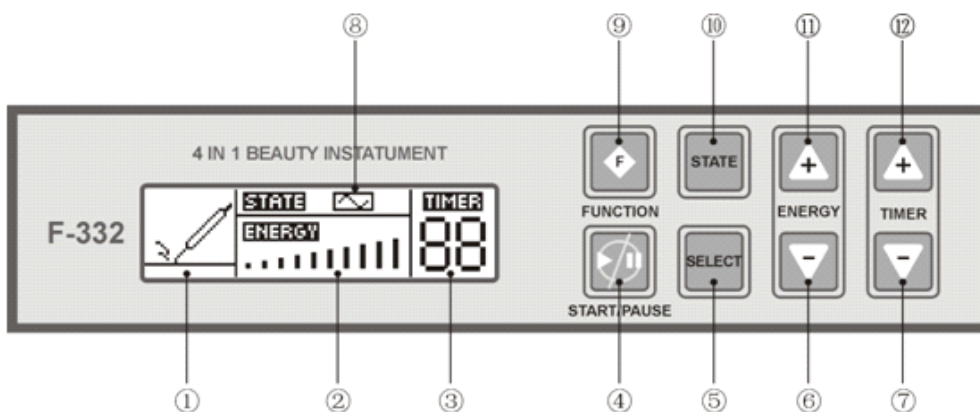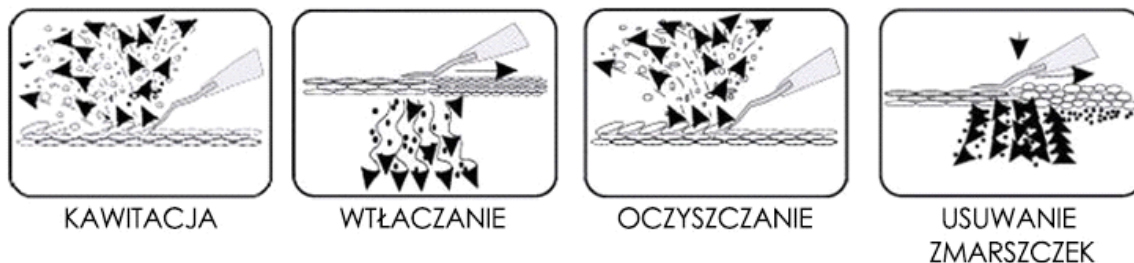

1. Ikona funkcji
2. Ikona intensywności
3. Ikona czasu
4. Start / pauza
5. Wybór
6. Zmniejszanie intensywności
7. Zmniejszanie czasu
8. Ikona rodzaju fali ultradźwiękowej
9. Funkcja
10. Funkcja
11. Zwiększanie energii
12. Zwiększanie czasu

UWAGA

- Należy pilnować aby obwód był zamknięty, gdy elektroda bierna nie będzie przylegała do skóry klientki, urządzenie nie będzie działało.
- Sprawdź dokładnie, czy nie ma problemów, takich jak złe połączenie, uszkodzona elektroda etc.
- Podczas zabiegu skóra powinna być ciągle zwilżana wacikiem nasączonym wodą lub tonikiem. W przeciwnym razie zjawisko kawitacji nie zaistnieje.

- Ustaw wybraną falę, czas oraz intensywność (zaczynij od min), następnie przyłóż elektrodę bierną na nadgarstek i wykonaj zabieg.

UWAGA

- Należy przestrzegać przeciwwskazań do wykonywania zabiegu (m.in.: choroby serca, choroby zakaźne, choroby neurologiczne, metalowe implanty, nowotwory).
- Nie należy przytrzymywać szpatełki w jednym miejscu dłużej niż 3 sekundy – można doprowadzić do poparzenia skóry.
- Nie należy ciągnąć za kable i przewody.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie pracy, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć. Nie wolno własnoręcznie zajmować się naprawą sprzętu, należy go odesłać do sprzedawcy, lub do serwisu.

Ultradźwięki

Częstotliwość ultradźwięków wynosi 20 000 Hz. Ultradźwięki wnikają w głębokie warstwy skóry. Ultradźwięki wywołują nagrzanie tkanek co ma na nie dobroczynny wpływ na tkanki. Poprawia krążenie krwi, zwiększa metabolizm, wpływa regulująco na układ nerwowy, pomaga usuwać skurcze mięśni, pomaga walczyć z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Ultradźwięki wywołują też efekt chemiczny, zwiększają procesy regeneracyjne w skórze oraz produkcję kolagenu i innych białek.

Do wyboru podczas zabiegu mamy trzy rodzaje fal ultradźwiękowych



- fala ciągła - w sposób ciągły przenika do skóry, bez przerwy na nią oddziałując




- fala przerywana o krótszym przebiegu fali



- fala przerywana o dłuższym przebiegu fali

Instrukcja obsługi ultradźwiękowe

- Należy włączyć urządzenie do sieci
- Włącz przycisk "ON / OFF" i ekran LCD.
- Wybieramy pożądaną rodzaj fali ultradźwiękowej, poziom intensywności (w trakcie zabiegu dopasowujemy go do odczuć klienta), oraz czas. Urządzenie po włączeniu pokaże nam domyślne ustawienia które można edytować jak powyżej.
- Po wyborze parametrów wciskamy przycisk start / pauza.

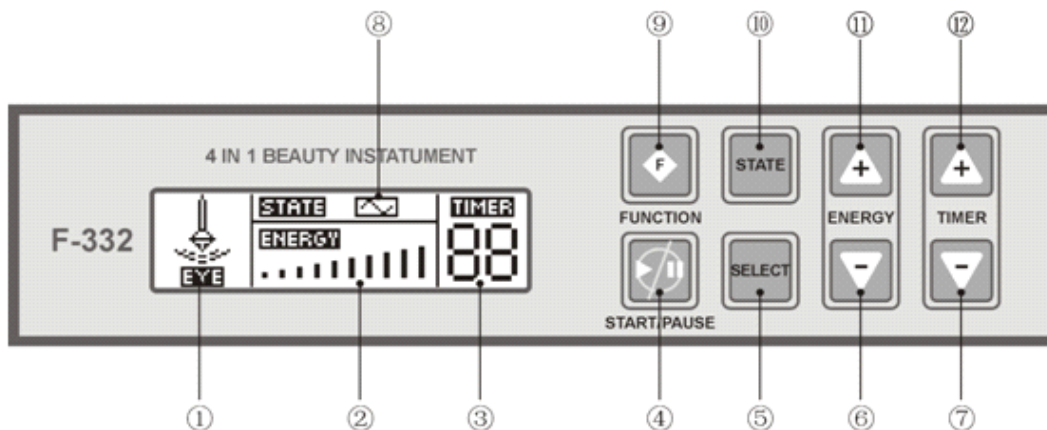

1. Ikona wybranej głowicy
2. Ikona intensywności
3. Ikona czasu
4. Start / pauza
5. Przycisk „wybór”
6. Zmniejszanie intensywności
7. Zmniejszenie czasu
8. Ikona wybranej fali ultradźwiękowej
9. Funkcja
10. Wybór funkcji ultradźwięków
11. Zwiększenie intensywności
12. Zwiększenie czasu

UWAGA

- Urządzenie i podzespoły powinny być utrzymywane w czystości i oczyszczone za każdym razem po wykorzystaniu i dezynfekowane preparatem do dezynfekcji narzędzi lub skóry.
- podczas korzystania z ultradźwięków, unikać okolic oczu.
- Czas zabiegu nie powinien przekraczać 15 minut
- Jeśli są wątpliwości czy głowica działa należy nanieść na nią kroplę wody, a następnie włączyć urządzenie i sprawdzić czy woda „drży”.

Mikrodermabrazja diamentowa


Funkcje mikrodermabrazji:

1. Usunięcie zrogowaciałej warstwy naskórka.
2. Zwiększenie elastyczności skóry, eliminacja zmarszczek, poprawa struktury skóry
3. Niwelowanie przebarwień skórnych i naskórkowych
4. Niwelowanie blizn i rozstępów.

Urządzenie przeznaczone jest do mechanicznego ścierania martwych komórek na skórka za pomocą diamentowych frezów różnej gradacji i z możliwością regulacji pompy ssącej. Jest to urządzenie najnowszej generacji.

Urządzenie zawiera 9 głowic ściernych o różnej gradacji i wielkości, dopasowanych do różnych potrzeb skóry oraz partii zabiegowych (twarz, ciało).

- Do diamentowej głowicy włóż filtr bawełniany lub siateczkowy, włóż uszczelkę, następnie skręć z dyszą.
- Dyszę włóż w gumowy wężyk.
- Podczas zabiegu palcem należy zasłaniać boczny otwór, aby zapewnić ssanie w dyszy.
- Po zabiegu należy zdemontować diamentową głowicę oraz filtr siateczkowy i zdezynfekować i umyć ją za pomocą myjki ultradźwiękowej i preparatu do dezynfekcji narzędzi. W przypadku filtra bawełnianego należy go wyrzucić.
- Gumowy wężyk należy raz na jakiś czas przepłukać pod bieżącą wodą. Odczekać do całkowitego wyschnięcia.

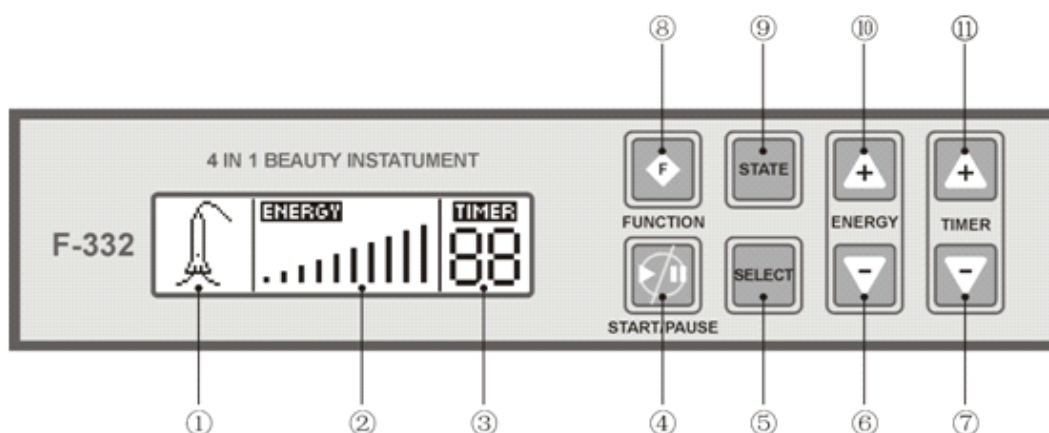

1. Ikona wybranej głowicy
2. Ikona intensywności
3. Ikona czasu
4. Start / pauza
5. Przycisk „wybór”
6. Zmniejszanie intensywności pompy ssącej
7. Zmniejszenie czasu

8. Funkcja
9. Wybór funkcji
10. Zwiększenie intensywności zasysania pompy ssącej
11. Zwiększenie czasu

Frezy najlepiej myć w myjce ultradźwiękowej która nie uszkadza fizycznie struktury frezu i nie ściera materiały ściernego z jego powierzchni, tak jak np. mycie szczoteczką.




Głowica ciepło - zimno

Głowica ciepła – przygotowuje skórę do innych zabiegów kosmetycznych, nagrzewa ją, zmniejsza ciśnienie i zwiększa wchłanianie substancji aktywnych w głąb skóry. Polepsza efekty zabiegów.

Głowica zimno – łagodzi skórę po zabiegach inwazyjnych np. kwasy, mikrodermabrazja, depilacja woskiem. Ma działanie niwelujące ból.

Instrukcja obsługi

- Podłącz urządzenie do sieci
- Po włączeniu panelu głównego należy skonfigurować funkcję na gorącą lub zimną, oraz ustawić temperaturę i czas, następnie należy włączyć przycisk Start / Pauza aby rozpocząć pracę. Urządzenie osiąga pożądaną temperaturę po około 5 min. Jeśli chcemy zmienić funkcję z ciepłej na zimną lub na odwrót potrzeba na to około 5 min.

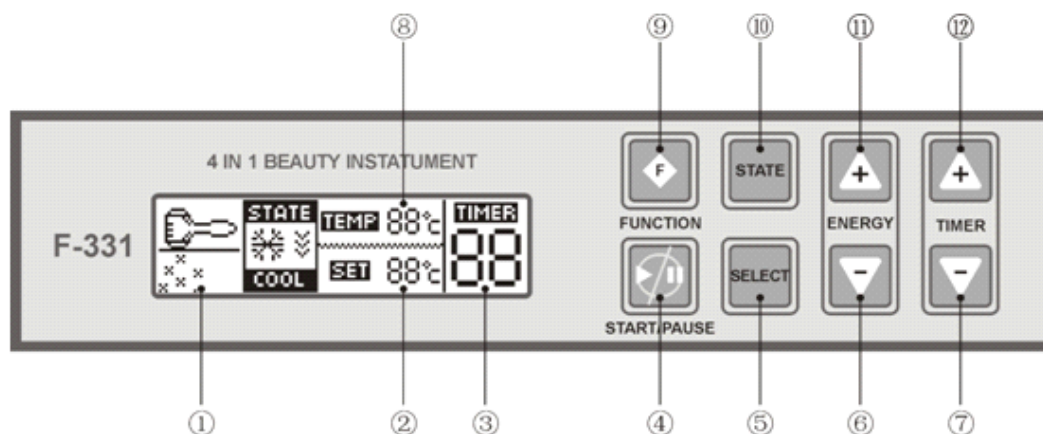

- Ikona głowicy ciepło – zimno
- Wyświetlanie temperatury
- Czas
- Przycisk start / pauza
- Brak działania w ramach tej funkcji
- Zmniejszanie intensywności
- Zmniejszanie czasu
- Rzeczywisty wskaźnik temperatury
- Wybór funkcji
- Zmiana funkcji ciepło <-> zimno
- Zwiększanie intensywności
- Zwiększanie czasu

