

Urządzenie AT-705 Darsonval

AT-705 jest profesjonalnym urządzeniem kosmetycznym do wykonywania bezpiecznych i sterylnych zabiegów dezynfekujących. Idealnie sprawdzi się w przy zabiegach ręcznego oczyszczania skóry, wszelkich rodzajach mikrodermabrazji oraz zabiegach prewencyjnych mających na celu zapobieżenie infekcjom drobnoustrojowym. Urządzenie wykorzystuje prądy d'Arsonvala, czyli prądy o wielkich częstotliwościach, oraz ozon mający właściwości bakteriobójcze, który wytwarza się w czasie zabiegu przy użyciu specjalnej peloty. Dodatkowo, prądy d'Arsonvala mają działanie uspokajające na układ nerwowy, w związku z czym zabiegi darsonwalizacji są polecane osobom z problemami nerwicowymi oraz problemami z bezsennością.

Parametry techniczne:

napięcie 220 V,

częstotliwość 56-60 HZ

moc 10 W

4 peloty o różnych kształtach:


prętowa (szyftowa) do poszczególnych zmian

w kształcie grzybka – do twarzy i innych partii ciała

w kształcie łyżeczki – do miejsc trudno dostępnych

grzebieniowa – do rewitalizacji skóry głowy

Wymiary: wys. 11 cm x szer. 24 cm

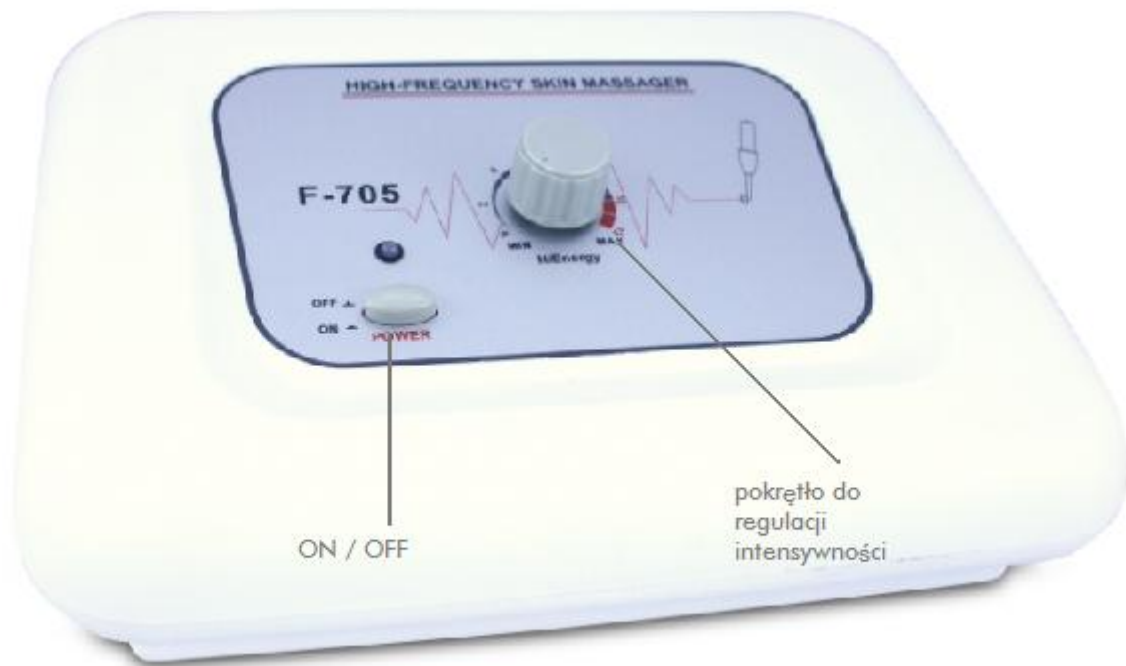

1. Podłącz urządzenie do sieci
2. Wybierz odpowiednią do zabiegu szklaną pelotę
3. Włóż ją do uchwytu, pilnując by była odpowiednio osadzona tak by nie wypadła.
4. Ustaw pokrętko ENERGY na min
5. Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF – powinna zapalić się kontrolka
6. Chwyć za uchwyt w którym osadzona jest pelota i przyłóż pelotę do ciała klientki, stopniowo, do odczuć klientki zwiększaj intensywność pokrętkiem ENERGY.
7. Przesuwamy pelotę powoli po partii zabiegowej.
8. Po zakończonym zabiegu nie odrywając peloty od ciała klientki, zmniejszamy intensywność do min, odkładamy pelotę od skóry i wyłączamy urządzenie.

9. Pelotę dezynfekujemy preparatem do dezynfekcji, kiedy ostygnie, i odkładamy do etui.
10. Nie należy kłaść peloty na zimne podłoże.

Pelota może dotykać w trakcie zabiegu skóry – wtedy zabieg jest delikatniejszy – można także trzymać pelotę w odległości ok. 1 cm od skóry. Podczas zabiegu powstaje bakteriobójczy ozon. Wewnątrz peloty wytwarzane są gazy szlachetne.

Klient podczas zabiegu powinien mieć zdjęte metalowe elementy (biżuterię etc.)

Należy przestrzegać przeciwwskazań do wykonania zabiegu.