

## Urządzenie kosmetyczne AT – 333 RF Radiofrekwencja



AT-333 to profesjonalny sprzęt kosmetyczny działający przy użyciu fal radiowych i wykorzystywany w nieinwazyjnych i bezbolesnych zabiegach wygładzających zmarszczki i zwiększających napięcie skóry. Zabiegi radiofrekwencji opierają się na spowodowaniu kurczenia się włókien kolagenowych zawartych w skórze poprzez nagrzanie tkanek. W efekcie, włókna kurczą się i napinają, dodatkowo stymulując fibroblasty do produkcji nowego kolagenu i zagęszczenia struktury skóry – dzięki temu nabiera ona młodszego i zdrowszego wyglądu, utrzymującego się przez długi czas po zabiegu.

W skład urządzenia wchodzi:

- baza
- elektroda bierna
- zestaw 7 elektrod zabiegowych emitujących fale radiowe
- kabel zasilający
- instrukcja
- gwarancja 12 miesięcy

Parametry techniczne:

- częstotliwość RF wyjściowa między elektrodami 0,3MHz / 0,5 MHz
  - częstotliwość fali radiowej dla twarzy i ciała – 0,5 MHz
  - zakres temperatury 10 st.C – 50 st.C
  - ilość opakowań 1
  - rozmiary elektrod:  $\varnothing 70\text{mm}/\varnothing 60\text{mm}/\varnothing 50\text{mm}/\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 30\text{mm}/\varnothing 20\text{mm}/\varnothing 10\text{mm}$ .
- Wymiary: wys. 12 cm x szer. 33 cm x dł. 26 cm


uchwyt na elektrody do ciała




uchwyt na elektrody do twarzy



elektroda bierna

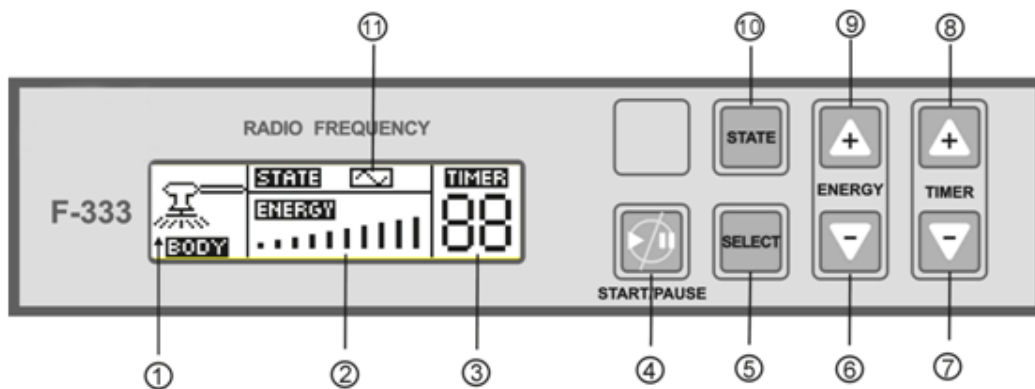

1. Ikona wybranej głowicy
2. Intensywność
3. Czas
4. Start / pauza
5. Przełącznik funkcji twarz / ciało
6. Zmniejszenie energii
7. Zmniejszenie czasu
8. Zwiększanie czasu
9. Zwiększanie energii
10. Zmiana rodzaju fali
11. Ikona rodzaju fali

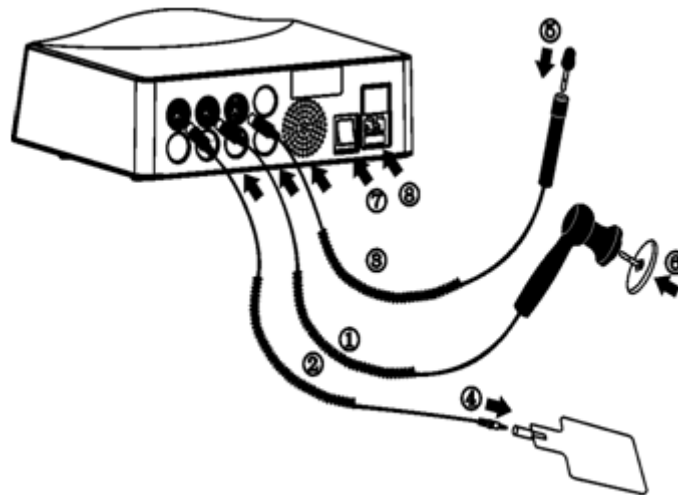

1. Przewód elektrody czynnej – zabiegowej na ciało
2. Przewód elektrody biernej
3. Przewód elektrody czynnej – zabiegowej na twarz
4. elektroda ujemna
5. elektroda ceramiczna
6. elektroda ceramiczna
7. włącznik urządzenia 0-1
8. gniazdo na przewód zasilający

Schemat zabiegu:

1. włącz urządzenie do sieci i włącz ekran
2. wybierz głowicą jaką będziesz pracował, wybierz czas, ustaw min intensywność
3. podłącz odpowiedni do wybranej głowicy przewód i do uchwytu włóż odpowiednią głowicę ceramiczną. Wybierz rodzaj fali zabiegowej
4. przed przystąpieniem do zabiegu należy podłożyć elektrodę bierną pod łopatkę lub udo klienta
5. po ustawieniu parametrów włącz przycisk start / pauza i rozpocznij zabieg.

Zabieg można wykonywać max 15 min, 15 min na okolice oczu, 30 min na piersi lub inną część ciała (czas zabiegu łącznie na wszystkich partiach ciała nie powinien przekraczać więcej niż 2.5 godziny).

Zabieg na twarzy:

1. Czoło: najlepiej wybrać poziom energii 5-8

Pociągnij w górę od środka czoła do dwóch stron, powtórzyc 5-8 razy, aż pojawi się zaczerwienienie. Okolice oczu 1 cm wokół brwi są bardziej wrażliwe – należy zmniejszyć intensywność.


2. Oczy: najlepiej wybrać poziom energii 3-8

Podczas zabiegu wokół oczu, omijamy gałki oczne aż do kości oczodołowej.

3. Policzki, broda, okolice ust : najlepiej wybrać poziom energii 6-10

Kierunki prowadzenia głowicy:

Wykonuj ruchy zgodne z zasadami masażu klasycznego i zgodnie z przebiegiem mięśni

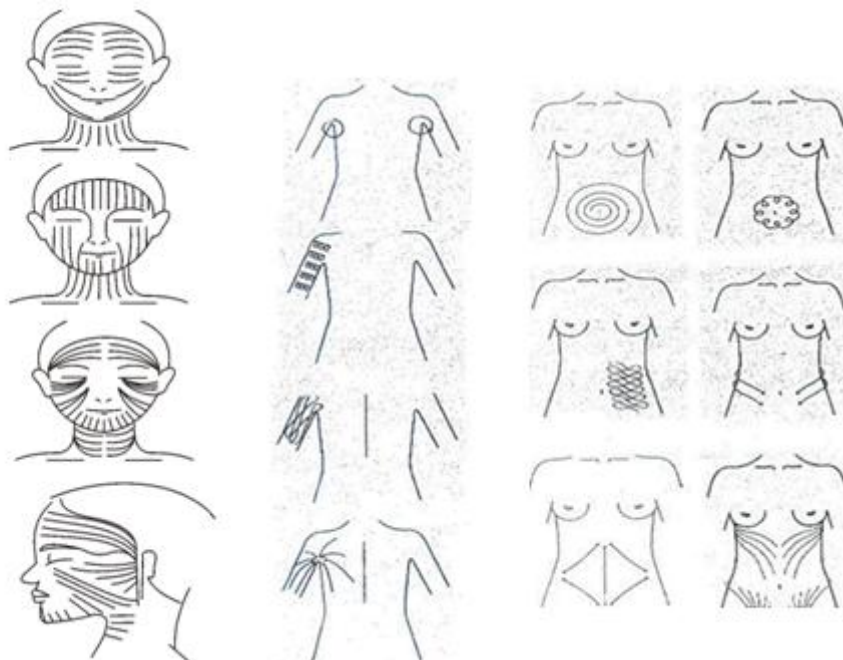



#### Ważne uwagi:

1. Należy pamiętać że nie wolno wykonywać zabiegów zbyt często, zbyt częste wykonywanie zabiegów nie da lepszych rezultatów. Zabiegi RF wykonuje się raz na 4 tygodnie. Nie częściej.
2. Nie należy przytrzymywać głowicy w jednym miejscu więcej niż 5 sekund, ponieważ można doprowadzić do poparzenia skóry i tkanek podskórnych.
3. Po zakończeniu leczenia, należy pić dużo wody
4. Tego samego dnia klient nie powinien mieć wykonywanych więcej zabiegów które powodują przegrzanie tkanek, np. sauna, solarium, IPL czy laser.

#### Należy przestrzegać przeciwwskazań do zabiegu, m.in:

- choroby serca
- cukrzyca
- nadczynność tarczycy
- nowotwory
- nadciśnienie
- metalowe implanty
- rozrusznik serca
- epilepsja
- choroby skóry
- ciąża
- karmienie piersi
- menstruacja

- świeże blizny