

Instrukcja obsługi sterylizatora S-02

DOKŁADNIE PRZECZYTAJ WARUNKI TECHNICZNE PRZED UŻYCIEM

Ostrzeżenie: Zawsze, kiedy urządzenie elektryczne jest używane, zwłaszcza w obecności dzieci, zwrócić szczególną uwagę na poniższe środki ostrożności.

Uwaga: Używać gniazdka z wyłącznikiem prądu.

1. Po zakończeniu natychmiast odłączyć urządzenie od prądu.
2. Nie używać i nie przechowywać urządzenia w łazience lub miejscach wilgotnych.
3. Nie przedłużać kabla zasilającego z żadnej strony.
4. Po podłączeniu urządzenia do prądu, nie pozostawiać urządzenia bez opieki, zwłaszcza w pobliżu dzieci.
5. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie. W razie, gdy urządzenie wpadnie do wody, nie dotykać urządzenia ani wody i natychmiast odłączyć urządzenie od prądu.
6. Jeśli kabel jest uszkodzony, podlega wymianie u producenta, naprawie w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia.

OPIS POSTĘPOWANIA

Włożyć narzędzie do gabloty. Ustawić gablotę w odpowiedniej pozycji. Włączyć urządzenie. Zabieg dezynfekcji rozpocznie się, gdy światło przyjmie barwę fioletową. Podczas zabiegu narzędzie może być użyte przez wyciągnięcie gabloty (światło zostanie wyłączone).

Czas dezynfekcji: 30-45 minut (można regulować).

