

Urządzenie AT-829 Elektrokoagulator

ATHENA AT-829 to nowoczesny i profesjonalny sprzęt do wykonywania zabiegów mających na celu niwelację bądź usunięcie zmian skórnych (prosaki, brodawki wszelkiego rodzaju, włókniaki, kurczaki) z wykorzystaniem elektrokoagulacji. Elektrokoagulacja to proces, w którym dzięki działaniu łuku elektrycznego (termolizy) następuje ścięcie białek komórkowych a w rezultacie likwidacja zmiany skórnej. AT-829 idealnie sprawdzi się w usuwaniu kurczaków na dłoniach i stopach, co znacznie ułatwi zabiegi manicure i pedicure.

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie 220 V
- Częstotliwość 56-60 HZ
- Moc 14 W
- 10 poziomów intensywności

WYMIARY: wys. 13 cm x szer. 24 cm x dł. 26 cm

W SKŁAD URZĄDZENIA WCHODZĄ:

- Baza urządzenia
- Rączka do igieł
- Komplet igieł cienkich
- Komplet igieł wkręcanych
- Kabel zasilający



1. Pokrętło do regulacji intensywności łuku elektrycznego
2. Włącznik on/off
3. Wyświetlacz intensywności
4. Kontrolka on/off

Instrukcja użycia:

1. Podłącz urządzenie do sieci
2. Do rączki do igieł wybierz odpowiednią igłę jakiej potrzebujesz do zabieg i zamocuj ją w rączce
3. Włącz urządzenie przyciskiem on/ff – powinna włączyć się kontrolka
4. Ustaw intensywność łuku elektrycznego za pomocą pokrętła i reguluj ją w zależności od potrzeby zabiegu.
5. Po zakończonym zabiegu wyłącz urządzenie.