


Urządzenie kosmetyczne AT 319A – Mikrodermabrazja diamentowa

Funkcje mikrodermabrazji:

1. Usunięcie zrogowaciałej warstwy naskórka.
2. Zwiększenie elastyczności skóry, eliminacja zmarszczek, poprawa struktury skóry
3. Niwelowanie przebarwień skórnych i naskórkowych
4. Niwelowanie blizn i rozstępów.

Ilustracja panelu:

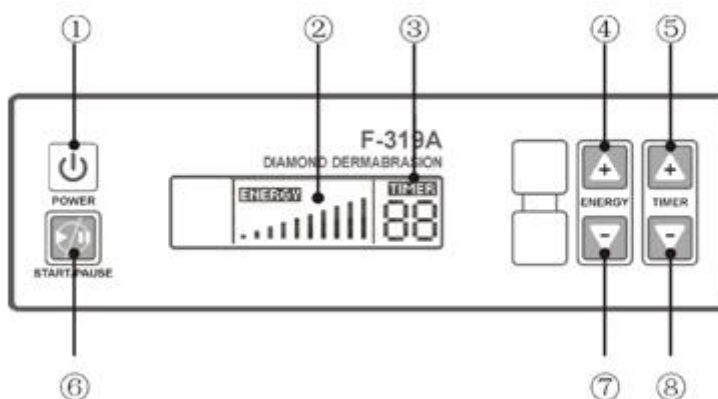


1. Włącz/ wyłącz
2. Wskaźnik intensywności pompy ssącej
3. Wskaźnik czasu
4. Ustawienie intensywności +
5. Ustawienie czasu +
6. Start / pauza
7. Ustawienie intensywności -
8. Ustawienie czasu -

Urządzenie przeznaczone jest do mechanicznego ścierania martwych komórek na skórka za pomocą diamentowych frezów różnej gradacji i z możliwością regulacji pompy ssącej. Jest to urządzenie najnowszej generacji.

Urządzenie zawiera 9 głowic ściernych o różnej gradacji i wielkości, dopasowanych do różnych potrzeb skóry oraz partii zabiegowych (twarz, ciało).

Instrukcja montażu:

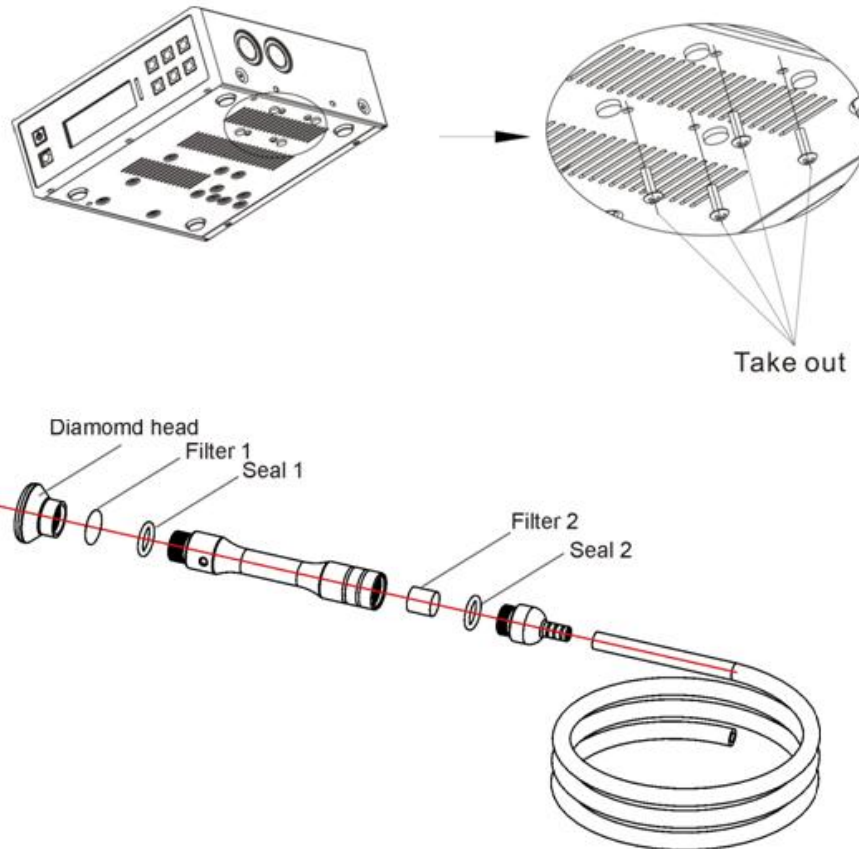

1. Do diamentowej głowicy włóż filtr bawełniany lub siateczkowy, włóż uszczelkę, następnie skręć z dyszą.
2. Dyszę włóż w gumowy wężyk.
3. Podczas zabiegu palcem należy zasłaniać boczny otwór, aby zapewnić ssanie w dyszy.
4. Po zabiegu należy zdemontować diamentową głowicę oraz filtr siateczkowy i zdezynfekować i umyć ją za pomocą myjki ultradźwiękowej i preparatu do dezynfekcji narzędzi. W przypadku filtra bawełnianego należy go wyrzucić.
5. Gumowy wężyk należy raz na jakiś czas przepłukać pod bieżącą wodą. Odczekać do całkowitego wyschnięcia.

W skład urządzenia wchodzi:

- baza urządzenia
- wężyk do mikrodermabrazji
- 2 dysze
- 9 frezów diamentowych do mikrodermabrazji różnej gradacji
- kabel zasilający

Parametry techniczne:

- napięcie 230V - 50/60 Hz
- moc 65W

Wymiary: wys. 7 cm x szer. 20,5 cm x gł. 22 cm

Frezy najlepiej myć w myjce ultradźwiękowej która nie uszkadza fizycznie struktury frezu i nie ściera materiały ściernego z jego powierzchni, tak jak np. mycie szczoteczką.

Frezy będą miały dłuższą żywotność.

